



Jednoduchá kultivácia moču priamo na pracovisku. Uricult® Trio Model Chart

Uricult® Trio

Systém na detekciu bakteriúrie založený na kultivácii.

- Informácie pre objednávanie: 68197 Uricult Trio, 10 testov
- CLED médium pre celkový počet baktérií
- Selektívne MacConkey médium pre gramnegatívne baktérie
- E. coli médium pre gramnegatívne β -glukuronidázu produkujúce mikroorganizmy, ako je *E. coli*, na ktorom môžu rásť aj niektoré kvasinky
- Detekčný rozsah 10^3 – 10^7 CFU/ml
- Uchovávajúte pri teplote 7–25 °C, chráňte pred prievanom a výkyvmi teplôt
- Doba použiteľnosti šesť mesiacov od dátumu výroby
- Inkubácia pri 36 ± 2 °C po dobu 16–24 hodín, v niektorých prípadoch môže byť požadovaná inkubácia ďalších 24 hodín

Odber vzorky

Pred odberom vzorky na bakteriálnu kultiváciu by mal byť moč v močovom mechúre po dobu štyroch hodín. Vzorku inokulujte hneď po odbere alebo ju pred inokuláciou môžete uchovať v chladničke (2–8 °C) po dobu až 24 hodín. Niektoré lieky (zvlášť antibiotiká) môžu ovplyvniť výsledky. Vzorka by preto nemala byť odobratá skôr ako 48 hodín po poslednej dávke liekov.

Viac informácií nájdete v návode na použitie.



Je to tak jednoduché!



Ponoriť alebo poliať



Inkubovať



Vyhodnotiť

Uricult[®] Trio

Mikroorganizmy na médiách



Hustota kolónií *Escherichia coli* CFU/ml

